

کالیبراتور LDL-Chol

نگهداری و پایداری

در صورت باز نشدن درب و یالها، نگهداری در $2-8^{\circ}\text{C}$ و محافظت از نور، تا تاریخ انقضاء ذکر شده روی برجسب پایدار است و پس از آماده سازی 14 روز در $2-8^{\circ}\text{C}$ و به صورت فریز شده به مدت 4 هفته در -80°C پایدار می باشد.

آماده سازی

با دقت درب یک ویال حاوی پودر لیوفیلیزه را باز کرده و 1 سی سی آب مقطر دیونیزه اضافه کنید و به آرامی تکان دهید تا حل گردد. 10 دقیقه صبر کرده و پس از حل شدن و یکنواختی کامل مورد استفاده قرار دهید.

ترکیب و احتیاط

کالیبراتور LDL-Chol از سرم انسانی تهیه گشته است و با وجود نتایج منفی تست های Anti HCV, Anti HIV I,II هنگام کار رعایت نکات ایمنی ضروری است. از تماس با پوست و چشم جلوگیری کرده و در صورت تماس، موضع را با آب شستشو دهید. غلظت کالیبراتور بسته به سری ساخت متفاوت بوده و بر روی برجسب ذکر شده است.

کال